

# QuantiFit2

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## 1 Connectez l'alimentation et allumez l'instrument

L'interrupteur est situé en haut à gauche du panneau arrière



Suivez l'assistant de démarrage

ur sélectionner la langue, les réglementations, les masques, les opérateurs et les sujets de test

### La configuration initiale

Vous pouvez modifier n'importe lequel de ces paramètres à tout moment dans le menu des paramètres.


Appuyez sur la flèche pour procéder à la configuration de la régulation, des respirateurs et des opérateurs.,.

Vous pouvez quitter à tout moment en appuyant sur l'icône «X» sur les écrans suivants..




## 3 Vérification quotidienne

Connectez tous les tubes à l'avant de l'instrument

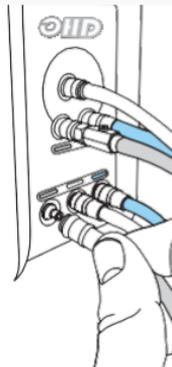

## 4 Retirez les 3 tuyaux inférieurs une fois

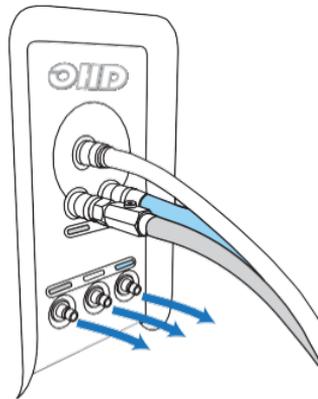

- 5 Sélectionnez ou entrez un sujet de test, puis appuyez sur


**People**

Search By: Last Name  ID

Select Company:

Ebright, Randolph	12128
<b>Endow, Keith</b>	<b>68542</b>
Esotioke, Mark	78546
Estera, Joseph	75669
Ewan, Christopher	26798

- 7 Préparer le masque:  
Prop ouvrir ou enlever les valves  
d'inhalation

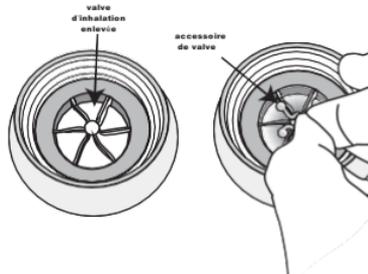

- 6 Entrez toutes les informations de test spécifiées

**OSHA Regulation**

Person:


Respirator:

Size:


Operator:

Auto Start?

- 8 Connectez adaptateur ou adaptateur  
masquer

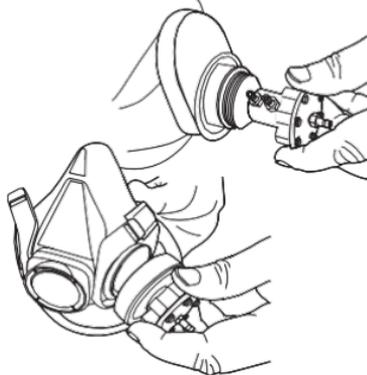

- 9** Connecter les tubes à l'adaptateur. Les tubes gris et clairs sont interchangeables

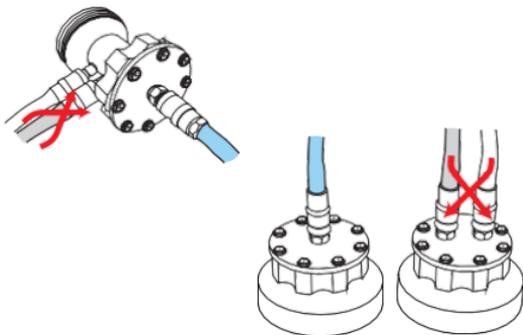

- 10** Suivez les instructions à l'écran

**Step 1 of 5: Face Forward**



1. Don the respirator and adjust the straps
2. Press the blue arrow to begin the test



- 11** Test: Suivez les instructions à l'écran pour passer le test.



- 12** Fin du test, signe de l'opérateur l'employé

Employee Signature

**13** Confirmer la taille du masque et le modèle pour procéder


Overall Fit Factor:  
**2702 Pass**

Step	Fit Factor	Leak Rate	3M 6000 Series
Step 1	2972	31.3 cc/min	<b>Medium</b> →
Step 2	3011	30.9 cc/min	<b>APR Half</b> →
Step 3	2644	35.2 cc/min	
Step 4	2824	32.0 cc/min	
Step 5	2897	32.1 cc/min	



**15** Remplacer la valve d'inhalation enlever l'accessoire de valve pl début de l'essai

La flèche conduira au prochain t

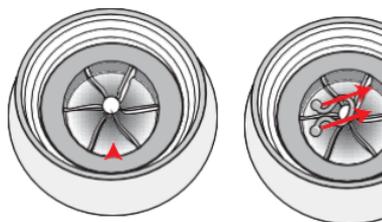

**14** Imprimez le test, visualisez les résultats ou passez à l'écran suivant

OVERALL FIT FACTOR:  
**1248 PASS**

Print Report 

Generate PDF 

Review Test 

Next Test 



YOUR PROTECTION OUR PRIORITY

2687 John Hawkins Pkwy  
Hoover, Alabama 35244

+1.205.980.0180

[OHDGLOBAL.COM](http://OHDGLOBAL.COM)

© OHD 2020